

Утвержден
КСК 0.00ПС-ЛУ

Открытое акционерное общество
"Гродненский завод торгового машиностроения"
230023, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Тимирязева, 16

ОКП РБ 32.50.12.000

КОРОБКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ КСК

Паспорт
КСК 0.00ПС

Система менеджмента качества разработки и производства продукции
соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015

1 Назначение

Коробки стерилизационные круглые КСК-3, КСК-6, КСК-9, КСК-12, КСК-18 (далее - коробки) предназначены для размещения в них перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов медицинского назначения с целью стерилизации их в паровых медицинских стерилизаторах и доставки к месту использования, а также стерильного хранения в течение 3 суток.

Применяются во всех областях медицины, где требуется стерильность применяемых медицинских материалов и инструментов.

Регистрационное удостоверение МЗ Республики Беларусь № ИМ-7.5619/2006 от 25.06.2020. Срок действия – до 25.06.2025.

Регистрационное удостоверение МЗ Республики Узбекистан ТВ/Х 01242/06/17 от 25.05.2022. Срок действия – до 25.05.2027.

Регистрационное удостоверение МЗ Республики Казахстан РК – ИМН – 5 № 001180 от 16.02.2018. Срок действия – до 16.02.2023.

2 Технические характеристики

Наименование параметра	КСК – 3	КСК – 6	КСК – 9	КСК – 12	КСК-18
Условный объем, дм ³	3	6	9	12	18
Диаметр, мм, не более	175	245	275	325	390
Высота, мм, не более	170	170	190	190	190
Масса, кг, не более	0,8	1,1	1,3	1,7	2,2
Количество замков	1	2	2	2	2

3 Комплект поставки

Коробка, шт. 1

Паспорт, шт. 1

Упаковка, шт. 1

4 Устройство коробок и указания по эксплуатации


4.1 Устройство коробок показано на рис.1

4.2 Коробка состоит из корпуса **1** с замком(ами) **4**, крышки **3**, с ручкой **2**. Фиксатор **6** предотвращает самопроизвольное открывание замка.

4.3 Металлические детали коробок изготовлены из коррозионностойкой стали.

4.4 Плотность прилегания крышки к корпусу регулируется подгибкой серьги **5** замка (ов) **4** по радиусу Б.

4.5 Для обеспечения стерилизации материалов и предметов медицинского назначения необходимо освободить застежку **8** и повернуть обечайку **7** относительно корпуса **1** совместив отверстия в обечайке с отверстиями в корпусе, обеспечивающими доступ внутрь коробки пара и воздуха. После стерилизации для предотвращения доступа воздуха в коробки, отверстия полностью перекрываются поворотом и фиксацией обечайки относительно корпуса при помощи застежки.

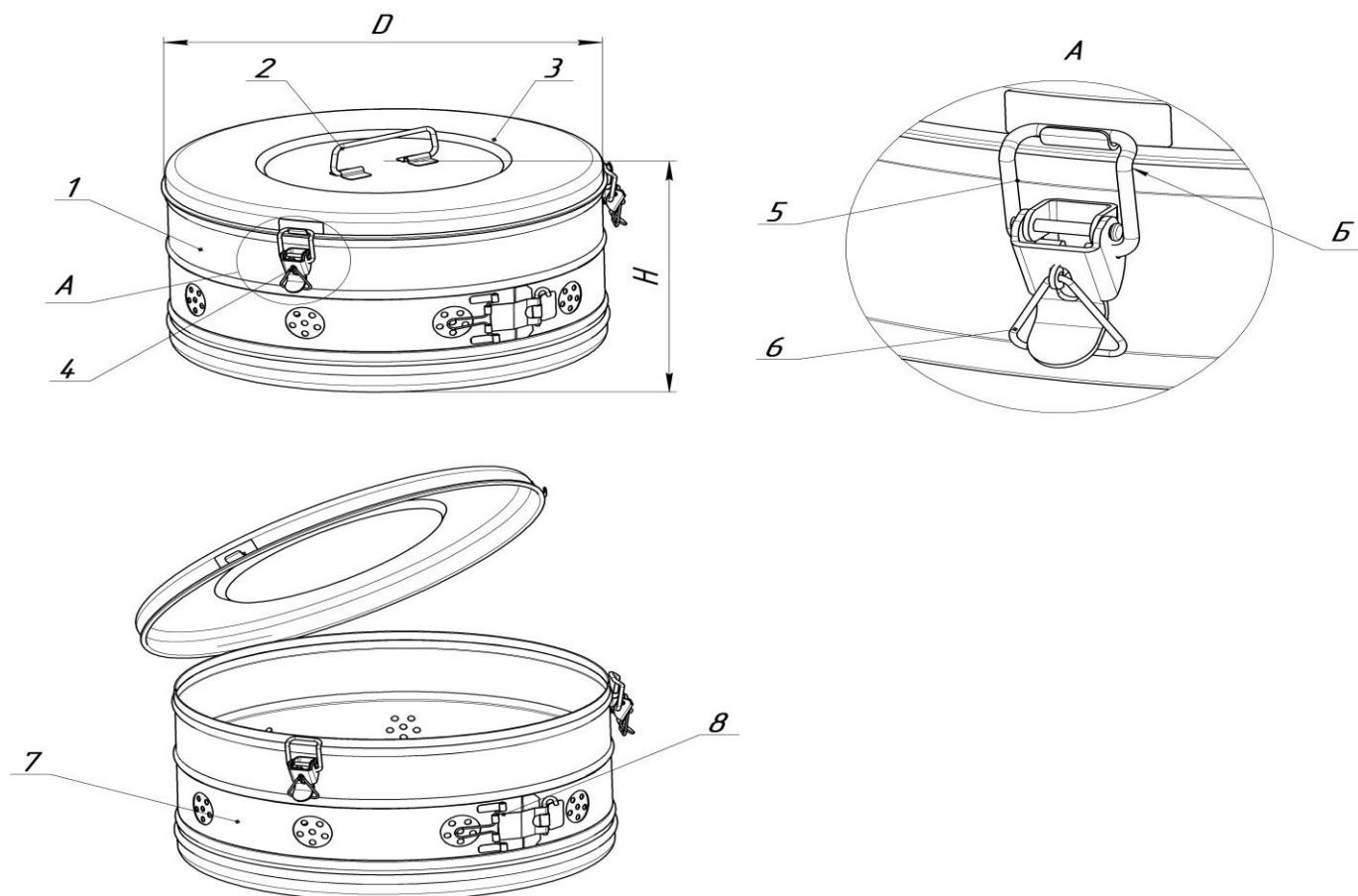

1 - корпус; 2 - ручка; 3 - крышка; 4 - замок; 5 - серьга; 6 - фиксатор; 7- обечайка; 8 – застёжка.

Рисунок 1 - Устройство коробок стерилизационных круглых КСК.

5 Подготовка коробок к работе

До начала применения, коробки должны подвергаться химической очистке дезинфекцией и предстерилизационной обработке в соответствии с действующими инструкциями Минздрава.

6 Свидетельство о приемке, упаковке и продаже

Коробка стерилизационная круглая КСК – _____ соответствует требованиям ТУ 92-00243346-04-93 "Коробки стерилизационные круглые КСК" и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК _____ Дата упаковывания (изготовления) _____
месяц, год

Продана _____
наименование предприятия торговли

Дата продажи _____
штамп магазина _____ подпись _____

7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи коробок.

7.2 В течение гарантийного срока изготовитель ремонтирует или заменяет коробки, или их составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя, при предъявлении настоящего паспорта с отметкой о дате продажи.

8 Утилизация

При утилизации необходимо разобрать коробку на составные части и утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны.